
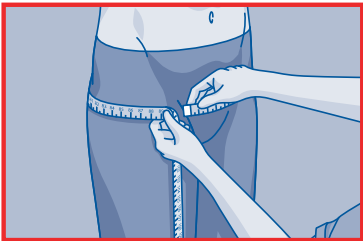



Attends® Pull-Ons

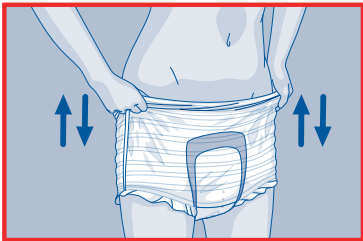


Användarinstruktion

- 1**  **Förberedelser**

Mät höfter och midja och utgå från det större måttet för att välja rätt storlek på skyddet.
- 2**  **Fixering**

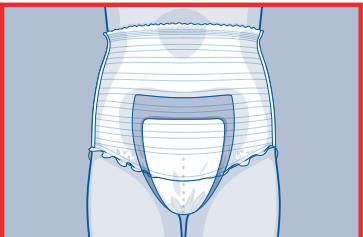Attends Pull-Ons kan användas som vanliga underkläder och skyddet kan dras upp och ner så ofta som önskas.
- 3**  **Passform**

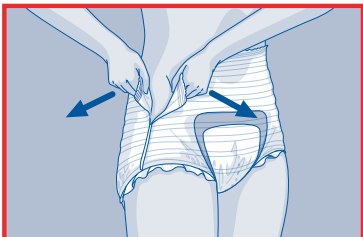Elasticiteten i byxan ger en smidig och komfortabel passform och det andningsbara materialet bidrar till god hudvård.
- 4**  **Byte**

Att ta av och byta skyddet är mycket enkelt: Du kan antingen dra ner skyddet eller riva upp båda sidorna.

Tips och Råd

Vid val av skydd

- Välj rätt storlek på Pull-Ons genom att mäta höftmått och midjemått och utgå från det större måttet av de båda.
- Välj absorptionsnivå utifrån mängden urin. För bästa möjliga komfort och diskretion bör du börja med ett lägre nummer på absorptionskalan innan du byter till en produkt med en högre absorptionsnivå.
- Pull-Ons är en effektiv lösning när det finns risk för att användaren avlägsnar kroppsförmodade skydd.

Fixering

- Kontrollera att skyddet är monterat på rätt håll.

Byte

- Kontrollera våtindikatorn - om våtindikatorn har försvunnit till mer än hälften av skyddets längd (60%) så behöver det bytas. Skyddet kan återförslutas om så inte är fallet.

Kassering av produkten

- Rulla ihop skyddet och släng det enligt gällande lokal avfallshänvisning.
- Spola inte ner skyddet i toaletten.

För mer information besök www.attends.se