


När du placerar Butterfly är den mer effektiv och bekväm om skyddets mitt är placerad hela vägen upp mellan skinkorna, och mitten av skyddet hamnar mot analöppningen. Det kan krävas lite övning att lära sig placera Butterfly på det sätt som passar bäst för just dig.

Så här använder du Butterfly

Följ instruktionerna nedan för maximal bekvämlighet och maximalt skydd.

Steg 1 Vikning med fästytorna utåt.

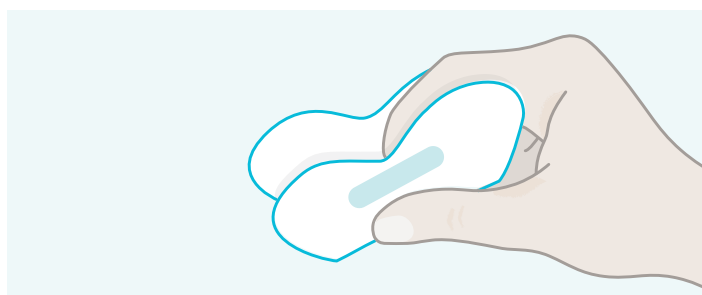

Tag bort pappret på baksidan och vik Butterfly på mitten med fästytorna på utsidan av vikningen.

Håll Butterfly så att de långa vingarna hamnar bakåt mot ryggen när den är rätt placerad.

Steg 2 Placering av Butterfly.



För att enklast placera Butterfly rätt, kan du böja dig antingen:

- 1.** Framåt och sträck dig runt kroppen för att placera produkten mellan skinkorna.
- Eller 2.** När du sitter ner på toaletten, sträck handen mellan benen och placera produkten mellan skinkorna.
- Eller 3.** Sätt upp ena benet på toaletsitsen, sträck handen mellan benen och placera produkten mellan skinkorna.

Placera Butterfly, antingen bakifrån eller framifrån, så att mitten av skyddet hamnar mot analöppningen. Tryck fästytorna lätt mot huden med hjälp av ditt finger så att den sitter på plats.

Tips och tricks

- Skyddets mitt ska skonsamt vidröra analöppningen. När du börjar använda Butterfly kan du uppleva att det känns konstigt att ha någonting mellan skinkorna, men om skyddet är rätt placerad ska det kännas bekvämt. Om det inte är bekvämt, kontrollera att skyddets mitt är placerad nära analöppningen och att fästytorna sitter varsamt mot huden.
- Fästytorna ska försiktigt fästas på huden för att Butterfly inte ska flytta sig och därmed bli obekvämt att använda. Butterfly är som bekvämast när det är varsamt fixerat mot huden, så att det sitter säkert på plats.
- När Butterfly är korrekt placerad ska de "långa vingarna" peka uppåt mot din rygg och de "kortare vingarna" nedåt. Detta underlättar när du ska ta bort skyddet.
- Kvinna: När skyddet sitter på plats ska det sitta så högt upp mellan skinkorna att skyddets vingar inte träffas av urin när du kissar. Om skyddet blir vått när du kissar, försök placera det något högre upp mellan skinkorna, överväg att prova storlek S/M om du använder storleken L/XL eller ta bort skyddet när du kissar och sätt därefter tillbaka det.
- När Butterfly är förbrukad, ta försiktigt bort skyddet från huden genom att hålla i de långa vingarna med handen. Vidrör inte skyddets mitt.
- Kassera Butterfly på samma sätt som andra sanitetsprodukter, till exempel i en papperskorg inlindad i antingen toalettpapper eller i en försluten plastpåse.

Läs mer om Butterfly på www.attends.se